

Tampons de ponçage Froggo pieds / 12,50 € ongles - 2.35 mm - My Podologie



Tampons de ponçage pour un soin abrasif des pieds et ongles rapide et complet.
3 textures au choix.

Modèle: 80 (Rugueux), 120 (Semirugueux), 180 (Légèrement rugueux)



caractéristiques du produit :

Diamètre: 2,35 mm

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Abrasion: Semiabrasif

Description du produit :

Tampons de ponçage - 2.35 mm

Type d'abrasion :

- 80 : Anrasif
- 120 : Semirabrasif
- 180 : Légèrement granuleux



Guide d'utilisation :

- 1 - Avant d'utiliser ce support, nettoyez-le avec de l'alcool à 70 % ou un autre agent nettoyant approprié. Assurez-vous que la surface du tampon à récurer est propre et exempte de graisse.
- 2 - Prenez le tampon de votre choix (80, 120 ou 180) et collez-le fermement sur le support.
- 3 - Appuyez fermement une fois sur le tampon pour bien le fixer. L'outil est maintenant prêt à être utilisé.
- 4 - Utilisez l'instrument pour l'abrasion des pieds ou des ongles. Suivez les instructions appropriées pour l'utilisation du tampon et assurez-vous de prendre les précautions nécessaires.
- 5 - Une fois le traitement terminé, retirez soigneusement le tampon du support et jetez-le dans les ordures ménagères.

Il est important de noter que ces tampons sont 100 % biodégradables. Ils sont fabriqués à partir de fibres de noix de coco, de bambou et de sable naturel, ce qui les rend respectueux de l'environnement. Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité et les recommandations du fabricant lors de l'utilisation du support et des tampons pour l'abrasion des pieds.