

Wip'Anios Excel - 50 Lingettes - Anios 8,25 €



Lingettes nettoyantes pour les surfaces et dispositifs médicaux avant désinfection.

Paquet de 50 lingettes en viscosse 100% biodégradable.



caractéristiques du produit :

Consignes d'utilisations: Dangereux – respectez les précautions d'emploi

Contenance du produit: 50 lingettes

Fonction du produit: Nettoyant multi-surfaces

Matière: Viscose 100% biodégradable

Quantité: 50 lingettes

Vendu stérile: Non

Marque: Anios

Mentions particulières: « Photos non contractuelles »

Description du produit :

Lingettes nettoyantes multi-surfaces x50 - WIP'ANIOS EXCEL

Paquet de 50 lingettes viscosse 100% biodégradable.

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immangeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

COMPOSITION

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3mn EN 13727 sur ERV, A. baumannii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM : 1mn EN 13697 sur ERV, A. baumannii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM : 2mn Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 5mn Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20mn Virus : Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV : 1mn Polyomavirus SV40 : 5 minutes Norovirus : 30mn

MODE D'EMPLOI

Prendre une lingette et bien refermer le dévidoir. Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une seconde lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée. Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical classe IIb.